

【吸入指導評価チェック表 (DPI)】

2017.8.13

デバイス名 (薬品名)	ディスクス (アドエア)	タービュヘイラー (パルミコート)	(シムビコート)	エリプタ (レルベア)
デバイスの操作	<input type="checkbox"/> カバーを空ける <input type="checkbox"/> 薬剤のセット (レバーをカチッと鳴るまで操作) <input type="checkbox"/> 2吸入以上する場合の操作	<input type="checkbox"/> 薬剤のセット(まっすぐに持つ) (底部を右側に止まるまで、左側にカチッと鳴るまで操作) <input type="checkbox"/> 2吸入以上する場合の操作 <input type="checkbox"/> 2回空操作(初回のみ)	<input type="checkbox"/> 薬剤のセット(まっすぐに持つ) (底部を右側に止まるまで、左側にカチッと鳴るまで操作) <input type="checkbox"/> 2吸入以上する場合の操作 <input type="checkbox"/> 3回カチッと鳴らず(初回のみ)	<input type="checkbox"/> カバーをカチッと音がするまで開ける
吸入前の息吐き	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く
吸入	<input type="checkbox"/> デバイスを水平に保持する <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 胸いっぱい深く息を吸う	<input type="checkbox"/> デバイスを倒しすぎないようにする <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 吸気孔をふさがない <input type="checkbox"/> 胸いっぱい深く息を吸う	<input type="checkbox"/> デバイスを倒しすぎないようにする <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 吸気孔をふさがない <input type="checkbox"/> 胸いっぱい深く息を吸う	<input type="checkbox"/> 吸入口を軽くくわえる <input type="checkbox"/> 側面の吸気孔をふさがない <input type="checkbox"/> 深呼吸程度に胸いっぱい吸う
吸入後の息止め と息吐き	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く <input type="checkbox"/> 吸い残しのチェックができる	<input type="checkbox"/> 息こらえ <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く <input type="checkbox"/> 吸い残しのチェックができる	<input type="checkbox"/> 息こらえ <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く <input type="checkbox"/> 吸い残しのチェックができる	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く
うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい
吸入器の管理	<input type="checkbox"/> 終了がわかる(カウンター「0」) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ	<input type="checkbox"/> 終了がわかる(小窓に赤い表示) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ	<input type="checkbox"/> 終了がわかる(小窓の中央に「0」) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ	<input type="checkbox"/> 終了がわかる(小窓が赤くふさがる) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ

デバイス名 (薬品名)	ブリーズヘラー (オンプレス)	(ウルティプロ)	スイングヘラー (メプチン)
デバイスの操作	<input type="checkbox"/> キャップを取り外し、マウスピースを開ける <input type="checkbox"/> 薬剤のセット① (1カプセルを出しブリーズヘラーに入れる) (カプセルは押し込める) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット② (吸入口をカチッと音がするまで閉める) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット③ (両側の青いボタンを1回押して戻す)	<input type="checkbox"/> キャップを取り外し、マウスピースを開ける <input type="checkbox"/> 薬剤のセット① (1カプセルを出しブリーズヘラーに入れる) (カプセルはアルミシート裏をはがす) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット② (吸入口をカチッと音がするまで閉める) <input type="checkbox"/> 薬剤のセット③ (両側の黄色いボタンを1回押して戻す)	<input type="checkbox"/> 防湿キャップを完全に開けて固定する <input type="checkbox"/> ラベルに表(水平)と表示している面(カウンターの面)を上にして持ち、青色の押しボタンが止まる所まで押し、戻す。 <input type="checkbox"/> (カウンターの数字が1減る)
吸入前の息吐き	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く	<input type="checkbox"/> デバイスをくわえる前にしっかり息を吐く
吸入	<input type="checkbox"/> ボタンが左右を向くように持つ <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 胸いっぱい深く息を吸う (カプセルが震える音が聞こえる)	<input type="checkbox"/> ボタンが左右を向くように持つ <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 胸いっぱい深く息を吸う (カプセルが震える音が聞こえる)	<input type="checkbox"/> デバイスをまっすぐに保持する <input type="checkbox"/> 吸入口をすき間なくくわえる <input type="checkbox"/> 空気取り入れ口をふさがない <input type="checkbox"/> 深く吸う
吸入後の息止め と息吐き	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く <input type="checkbox"/> 吸い残しのチェックができる	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く <input type="checkbox"/> 吸い残しのチェックができる	<input type="checkbox"/> 息こらえ(苦しくない程度に3~5秒) <input type="checkbox"/> ゆっくり息を吐く
うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい(必須ではない)	<input type="checkbox"/> 吸入後のうがい(必須ではない)
吸入器の管理	<input type="checkbox"/> カプセルは直接廃棄する <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (水洗い不可・1回/月交換)	<input type="checkbox"/> カプセルは直接廃棄する <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ (水洗い不可・1回/月交換)	<input type="checkbox"/> 終了がわかる(小窓にのカウンター「0」) (もう一度押すと「9」になり押しボタンが戻らない) <input type="checkbox"/> 吸入後のデバイスの手入れ